

Shine™ Rev

Guida all'utilizzo dell'apparecchio acustico intrauricolare (ITE)



Indice

Utilizzo della guida all'apparecchio acustico	
intrauricolare digitale Shine™	2/24
Prima applicazione	4/24
Applicazione dell'apparecchio acustico	
Shine™	5/24
Accensione e spegnimento del vostro	
apparecchio acustico Shine™	6/24
Informazioni sulla batteria	7/24
Istruzioni per l'uso	9/24
Utilizzo di Shine™ al telefono	11/24
Cura del vostro apparecchio acustico	
Shine™	12/24
Pulizia del vostro apparecchio	
acustico Shine™	14/24
Dispositivi di supporto all'ascolto	15/24
Avvertenze	16/24
Guida alla risoluzione dei problemi	20/24


Utilizzo della guida all'apparecchio acustico intrauricolare digitale Shine™

Usate le immagini seguenti per identificare i componenti dell'apparecchio acustico. L'immagine corrispondente al modello del vostro apparecchio acustico è stata contrassegnata dal vostro audio-protesista. Poiché ogni apparecchio è personalizzato e sagomato per adattarsi alla forma dell'orecchio dell'utente, l'aspetto e il posizionamento possono risultare leggermente diversi da quelli qui presentati.


L'apparecchio acustico è dotato di: (selezionare)

- Pulsante di programmazione
- Rotellina/manopola per il controllo del volume
- Pulsante per il controllo del volume.


Conca piena o
conca piena Power

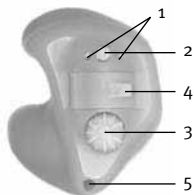


Canale o canale Power

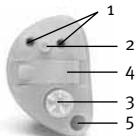

Mezza conca o
mezza conca Power

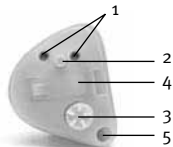

Mini canale o
mini canale Power

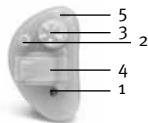

CIC o CIC Power



Legenda

- 1 Microfono
- 2 Pulsante di programmazione o controllo volume
(in base alla vostra regolazione personalizzata)
- 3 Rotellina/manopola per il controllo del volume
- 4 Vano batteria
- 5 Ventilazione
- 5 Filo di estrazione

Prima applicazione

L'apparecchio, prima di essere applicato da parte dell'audioprotesista per la prima volta sul portatore, deve essere pulito usando gli appositi prodotti. Vedete anche quanto riportato a pag. 17, "Pulizia del vostro apparecchio acustico Shine™".

Abituarsi ad un nuovo apparecchio acustico richiede tempo e spesso dipende dalle esperienze precedenti avute con altri apparecchi acustici. All'inizio può essere sufficiente portare l'apparecchio alcune ore al giorno, aumentando il tempo di utilizzo in maniera graduale. Dopo esservi abituati al vostro apparecchio acustico, dovrete portarlo sempre (ogni giorno per l'intera giornata), poiché solo un uso continuo vi consentirà di adattarvi all'apparecchio e di sfruttarne tutti i vantaggi.

Consultate il vostro audioprotesista per qualsiasi regolazione necessaria. Per esempio, l'intensità o il livello sonoro dei segnali acustici possono essere regolati oppure disattivati. Questa è una guida generale, ricordate che il vostro audioprotesista potrebbe aver attivato o disattivato alcune funzionalità in base alle vostre necessità.

Applicazione dell'apparecchio acustico Shine™

.....

Il contrassegno rosso all'interno del vano batteria indica l'apparecchio destro, quello blu il sinistro.

Per inserire un apparecchio acustico di tipo ITE o CIC:

1. Tenete l'apparecchio acustico tra pollice e indice, con il lato del vano batteria verso l'esterno.
2. Se l'apparecchio è di tipo CIC, inseritelo tenendolo in modo che il filo di estrazione sia rivolto verso il basso.
3. Inserite delicatamente la porzione intracanalare dell'apparecchio acustico nel condotto uditivo usando il dito indice per spingerlo fino al suo completo posizionamento.

Per rimuovere un apparecchio acustico di tipo ITE o CIC:

1. Se l'apparecchio acustico è di tipo CIC, tirate delicatamente il filo di estrazione. Per rimuovere un apparecchio di tipo ITE, afferratelo con indice e pollice.
2. Aprite e chiudete la mandibola o esercitate una lieve pressione sulla parte posteriore dell'orecchio per favorire l'espulsione dell'apparecchio.

Nota: non utilizzate mai il controllo volume, il pulsante di programmazione o il vano batteria per rimuovere l'apparecchio.

Accensione e spegnimento del vostro apparecchio acustico Shine™

.....

Accensione:

Questa è una guida generale, ricordate che il vostro audioprotesista potrebbe aver attivato o disattivato alcune funzionalità in base alle vostre necessità.

Nota: se l'accensione ritardata è attiva, l'apparecchio acustico si accenderà 5 secondi dopo aver chiuso il vano batteria. L'audioprotesista può aumentare ulteriormente il ritardo di avvio se necessario.

Spegnimento:

Per spegnere l'apparecchio acustico, aprite parzialmente il vano batteria o rimuovete la batteria.

Informazioni sulla batteria

Avviso batteria scarica

L'emissione di due segnali acustici lunghi da parte dell'apparecchio sta ad indicare che il livello di carica della batteria è basso. Dopo il primo segnale di avviso, potrete sentire una riduzione della qualità sonora, che verrà ripristinata inserendo una nuova batteria nell'apparecchio acustico.


Se preferite, il vostro audioprotesista può modificare il picco e l'intensità di questo segnale acustico o disattivarlo completamente.

Nota: L'avviso di batteria scarica viene emesso ogni 30 minuti, fino a quando non si sostituiscono le batterie oppure queste si esauriscono completamente. È dunque importante sostituire le batterie prima possibile dopo l'emissione del primo segnale di avviso di batteria scarica.

Sostituzione della batteria:

1. Aprite con delicatezza lo sportello batteria usando le unghie.
2. Afferrate la batteria con il pollice e l'indice e rimuovetela.
3. Inserite la nuova batteria con il polo positivo (+) nello stesso senso indicato dal segno (+) sul

bordo del vano batteria. In questo modo il vano si chiude correttamente.

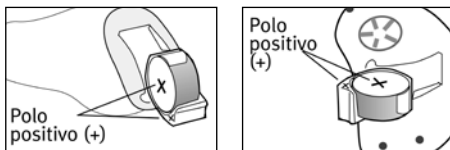

4. Chiudete il vano batteria.

Nota: se la batteria non viene inserita correttamente, il vano non si chiude.

Manutenzione delle batterie

- Smaltite le batterie negli appositi contenitori.
- Per allungare la vita della batteria, ricordatevi di spegnere l'apparecchio acustico quando non viene utilizzato.
- Quando l'apparecchio acustico non viene utilizzato, rimuovete la batteria e lasciate il vano aperto, per consentire l'evaporazione dell'umidità interna.


Istruzioni per l'uso

Il vostro apparecchio acustico intrauricolare Shine™ è dotato di 2 controlli principali per la regolazione dell'apparecchio.

Controllo volume

Se la rotellina/manopola è stata configurata come controllo volume, ruotatela lentamente in avanti verso il naso (oppure verso l'alto) per alzare il volume, oppure lentamente in direzione opposta per abbassare il volume.

L'apparecchio acustico emette un bip quando il livello di volume viene modificato. Fate riferimento al seguente grafico per ulteriori informazioni sui diversi bip di volume.

Impostazione volume	Bip
Livello ideale del volume	 1 bip
Livello del volume massimo	 2 bip
Livello del volume minimo	 2 bip






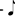
Pulsante

L'apparecchio acustico può presentare un pulsante impostato per passare da un programma all'altro o per regolare il volume.

Cambiamento dei programmi

Se è presente un pulsante attivo per il controllo dei programmi, ogni volta che il pulsante viene premuto si passa a un nuovo programma.






L'apparecchio acustico emette un segnale che indica il programma selezionato (per esempio un bip per il programma 1, due bip per il programma 2 ecc.).

Programma 1 (per es. Ambiente silenzioso)		1 bip
Programma 2 (per es. Rumore gruppo/Festa)	 - 	2 bip
Programma 3 (per es. Telefono)	 -  - 	2 bip

Controllo volume

Se il pulsante sull'apparecchio acustico è stato configurato come controllo volume, premete il pulsante per regolare il volume.

Il vostro audioprotesista può aiutarvi a identificare le diverse impostazioni del controllo volume.

Impostazione volume	Bip
Livello del volume ideale	 1 bip
Intensità aumentata	  1 bip + 1 bip ad alto picco
Intensità diminuita	  1 bip + 1 bip a basso picco

Utilizzo di Shine™ al telefono

La prestazione di ciascun telefono può cambiare in base al produttore, pertanto potreste sperimentare risultati diversi in base al telefono utilizzato. In molti casi, sarà sufficiente avvicinare il ricevitore all'orecchio, senza dover passare all'apposito programma telefonico sull'apparecchio acustico (se disponibile). Ricordatevi di muovere leggermente la cornetta per trovare la posizione di ascolto ottimale.

In base al tipo di telefono utilizzato, l'audioprotesista potrebbe aver selezionato un programma dedicato appositamente al telefono sull'apparecchio acustico Shine™.

Consultate l'audioprotesista per qualsiasi difficoltà nell'uso dell'apparecchio acustico insieme al telefono.

Cura del vostro apparecchio acustico Shine™

.....

- Lasciate aperto il vano batteria quando non utilizzate l'apparecchio.
- Rimuovete l'apparecchio acustico durante l'utilizzo di prodotti per capelli. Tali sostanze possono ostruirlo o impedirne il corretto funzionamento.
- Non indossate l'apparecchio acustico durante il bagno o la doccia, e non immergetelo nell'acqua.
- Se l'apparecchio acustico si bagna, non asciugatelo nel forno o nel forno a microonde. Non toccate i controlli di regolazione. Aprite immediatamente lo sportello della batteria e lasciate asciugare l'apparecchio acustico in modo naturale per 24 ore.
- Proteggete l'apparecchio acustico dal calore eccessivo (asciugacapelli, vano porta oggetti o cruscotto dell'automobile).
- Il regolare utilizzo di un deumidificatore, per esempio un cuscino essiccante, aiuta a mantenere l'apparecchio asciutto dall'umidità. Contattate l'audioprotesista per maggiori informazioni.

- Non lasciate cadere l'apparecchio acustico, data la sensibilità dei suoi componenti.
- Inoltre, va conservato nella sua custodia in luogo asciutto e al riparo dalla polvere.
- L'apparecchio non va lasciato in condizioni ambientali sotto gli 0°C o sopra i 50°C .

Pulizia del vostro apparecchio acustico

La formazione del cerume è normale e naturale. Un importante passaggio della pulizia e della manutenzione quotidiana è rappresentato dalla verifica dell'assenza di cerume.

- Rimuovete ogni giorno il cerume dall'apparecchio utilizzando lo spazzolino in dotazione.
- Non usate alcol per pulire l'apparecchio acustico.
- Non usate strumenti appuntiti per rimuovere il cerume. Inserire oggetti appuntiti nell'apparecchio acustico può danneggiarlo.
- Rivolgetevi all'audioprotesista per fissare appuntamenti regolari per la pulizia dell'apparecchio acustico.

Dispositivi di supporto all'ascolto.....

Ascolto in luoghi pubblici

La bobina telefonica di Shine™ può anche aiutare a sentire in luoghi pubblici dotati di dispositivi di ascolto compatibili, come un sistema loop.

Quando vedrete questo simbolo, significa che è presente un sistema loop, il quale è compatibile con il vostro apparecchio acustico. Rivolgetevi al vostro audioprotesista per maggiori informazioni.



Avvertenze

- L'apparecchio acustico deve essere utilizzato solo secondo le istruzioni fornite dall'audioprotesista.
- Gli apparecchi acustici non ripristinano la normale situazione uditiva e non evitano né migliorano i danni all'apparato uditivo dovuti a condizioni organiche.
- Non usate l'apparecchio acustico in aree a rischio di esplosione.
- Le reazioni allergiche agli apparecchi acustici sono rare. Tuttavia, se si avverte un senso di prurito, rossore, indolenzimento, infiammazione o bruciore dentro o intorno all'orecchio, contattate l'audioprotesista e consultate un medico.
- Nel caso improbabile che alcune parti rimangano nel condotto uditivo dopo la rimozione dell'apparecchio acustico, consultate immediatamente un medico.
- Togliete l'apparecchio acustico in caso di TAC, risonanza magnetica o altri esami elettromagnetici.
- Occorre prestare particolare attenzione quando

si indossano apparecchi acustici se i livelli di pressione audio superano i 132 decibel. In questo caso, infatti, si potrebbe correre il rischio di danneggiare ulteriormente l'udito. Rivolgetevi ad un audioprotesista per garantire che l'uscita massima del vostro apparecchio acustico sia adatta alla vostra situazione uditiva.

Avvertenze - batteria

- L'apparecchio acustico e la batteria devono essere conservati fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non mettete mai in bocca l'apparecchio acustico o la batteria. In caso di ingestione, consultate immediatamente un medico.

Precauzioni

- L'utilizzo di apparecchi acustici è solo una parte della riabilitazione dell'udito; potrebbe essere necessario un apprendimento specifico e istruzioni per la lettura del labiale.
- Nella maggior parte dei casi, l'uso non frequente dell'apparecchio acustico non offre i massimi vantaggi. Una volta abituati all'apparecchio acustico, è consigliabile indossarlo sempre.
- Il vostro apparecchio acustico è costruito con componenti moderni per fornire la migliore

qualità sonora in qualsiasi situazione d'ascolto vi troviate. Ciò nonostante, alcuni dispositivi di comunicazione come i telefoni cellulari possono creare delle interferenze nel vostro apparecchio acustico. In caso di interferenze provenienti da un telefono cellulare vicino a voi, potete ridurre l'interferenza girando il capo in una direzione differente, oppure allontanandovi dal telefono stesso.

Codice di identificazione

- Il numero di matricola è indicato sul guscio. Le prime due cifre individuano l'anno di produzione.

Guida alla risoluzione dei problemi

CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Nessun suono	
<ul style="list-style-type: none">• Non acceso• Batteria scarica/esaurita• Contatto batteria scarso• Batteria invertita • Apparecchio acustico occluso dal cerume	<ul style="list-style-type: none">• Accendere• Sostituire la batteria• Consultare l'audioprotesista• Inserire la batteria con il polo positivo (+) verso l'alto• Fare riferimento alla sezione "Pulizia del vostro apparecchio acustico Shine™". Consultare l'audioprotesista.
Suono troppo basso	
<ul style="list-style-type: none">• Volume basso • Batteria scarica• Apparecchio non inserito correttamente • Variazione dell'udito• Apparecchio acustico occluso dal cerume	<ul style="list-style-type: none">• Aumentare il volume; rivolgersi al proprio audioprotesista per avere un modello privo di controllo manuale del volume o se il problema persiste.• Sostituire la batteria• Reinserite con attenzione. Vedere "Applicazione dell'apparecchio acustico Shine™".• Consultare l'audioprotesista• Fare riferimento alla sezione "Pulizia del vostro apparecchio acustico Shine™". Consultare l'audioprotesista.
Intermittente	
<ul style="list-style-type: none">• Batteria scarica• Contatto batteria sporco	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire la batteria• Consultare l'audioprotesista

CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Due bip prolungati	
<ul style="list-style-type: none"> • Batteria scarica 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la batteria
Fischi	
<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchio non inserito correttamente • Volume troppo forte • Mani/vestiti vicini all'orecchio • Apparecchio acustico non conforme 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere e reinserire • Abbassare il volume • Allontanare mani/vestiti dall'orecchio • Consultare l'audioprotesista
Non chiaro, distorto	
<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchio acustico non conforme • Apparecchio acustico occluso dal cerume • Variazione dell'udito • Batteria scarica 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare l'audioprotesista • Fare riferimento alla sezione "Pulizia del vostro apparecchio acustico Shine™". Consultare l'audioprotesista. • Consultare l'audioprotesista • Sostituire la batteria
Debole al telefono	
<ul style="list-style-type: none"> • Controllo volume impostato troppo basso • Telefono non posizionato correttamente • L'apparecchio acustico necessita di una regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il volume • Spostate il telefono attorno all'orecchio per avere un segnale più chiaro. Consultare "Utilizzo di Shine™ al telefono". • Consultare l'audioprotesista

Per altri problemi non elencati nella guida, contattate il vostro audioprotesista.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CERTIFICATO DI GARANZIA VALIDO FINO AL

Cognome

Nome

Apparecchio acustico

Modello:

Matricola apparecchio

Destro:

Matricola apparecchio

Sinistro:

Pile modello

Data di acquisto

Il suo Audipotesista

Firma25/20

CENTRO AUDIOPROTESICO: